

# dermalight® 80

## MED- vagy MPD-tester

Multifunkciós készülék a minimális UV-B-Erythemdózis (MED), vagy a minimális fototoxikus UV-A- dózis (MPD) biztonságos szintjének meghatározására



### Különleges tulajdonságok

- Bőrtípus-függő vezérlés
- Másodpercpontos tesztidő meghatározás
- Gyors és egyszerű kezelés
- Nincs szükség a teljes bőrfelület letakarására
- Nincs szükség külön UV-sugárzást mérő készülékre
- A teszt végeztével automatikus kikapcsolás
- 4 év szavatosság

# dermalight® 80

## MED- vagy MPD-tester

Multifunkciós készülék a minimális UV-B-Erythemdózis (MED), vagy a minimális fototoxikus UV-A- dózis (MPD) biztonságos szintjének meghatározására



### Típusok

- UV-B/311 nm
- UV-B
- UV-A

### Technikai adatok - Tester

Méreték (h x sz x m):

300 x 60 x 45 mm

Sugárzás: 110 x 40 mm

Súly: kb. 285 g

Hálózati csatl.: 230V/50Hz

### Technikai adatok - vezérlő

Méreték (h x sz x m):

150 x 80 x 75 mm


Súly: kb. 600 g

### Gyártói tanúsítvány:

CE 0123

### Gyártói-Elektro-G

WEEE-Reg.-Nr.: DE 14312030

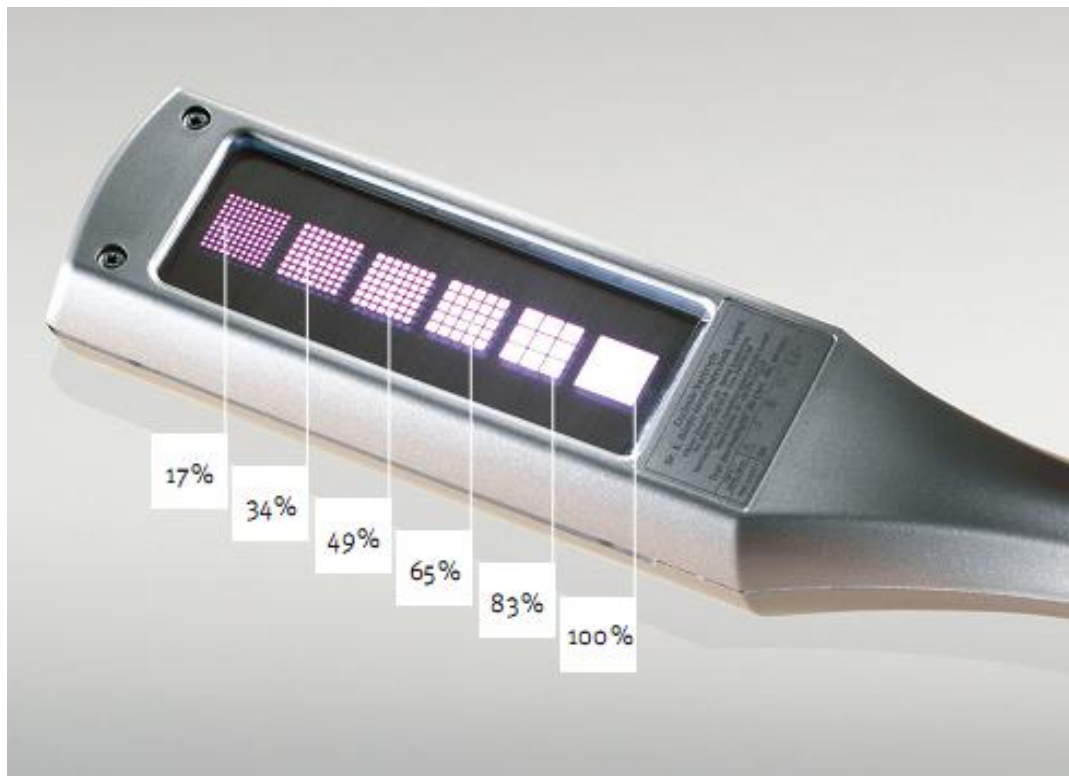

A dermalight® 80 MED- ill. MPD-Tester a megfelelő fényforrás (UV-B- keskenysávú spektrum / 311 nm, UV-B-szélessávú spektrum vagy UV-A- spektrum) kiválasztását követően, a MED, vagy az MPD dózis szintjének meghatározására szolgál.

A fénykálát borító fólián 6 tesztmező került kialakításra, amelyek különféle UV-szűrőkkel vannak ellátva. Az ezek segítségével meghatározott MED ill. MPD érték segít a későbbi fototerápiás kezelések optimális kezdődózisának meghatározásában.

A csomag tartalma: MED, ill. MPD-teszter, LCD-s vezérlőegység, kezelési útmutató, tárolóbőrönd a biztonságos szállításhoz és tároláshoz.

Dr. K. Höhle Medizintechnik GmbH

Viktor-Frankl-Straße 20

86916 Kaufering

Telefon: 0 81 91/3 05 55-0

Telefax: 0 81 91/3 05 55-50

E-Mail: [medizin@drhoenle.de](mailto:medizin@drhoenle.de)

Internet: [www.drhoenle.de](http://www.drhoenle.de)



Magyarországon forgalmazza

**MEDILAS**  
...medizintechnische Innovationen

Medilas Kereskedelmi Kft.

1089 Budapest, Baross u. 133.

Tel.: +36 1 477 01 30 Fax: +36 1 477 01 32

[www.medilas.hu](http://www.medilas.hu) [mail@medilas.hu](mailto:mail@medilas.hu)