

dermalight® 5000

Az innovatív, nagyteljesítményű UV-fényterápiás kabin



Kombinálható fénycsőkiosztás az Ön terápiás igényeinek megfelelően

Fénycsőkiosztás monoterápiához:

48 x 100 Watt UV-A

48 x 100 Watt UV-B/311 nm

48 x 100 Watt UV-B (SUP)

Kombinált fénycsőkiosztás:

24 x 100 Watt UV-A és

24 x 100 Watt UV-B/311 nm vagy,

32 x 100 Watt UV-A és

16 x 100 Watt UV-B/311 nm

Tecnikai adatok

Méretek (H x Sz x M):

101 x 101 x 205 cm

Belső méretek:

75 x 75 x 194 cm

Fogyasztás: 5200 Watt

Súly: ca. 260 kg

Hálózati csatlakozás:

400 Volt/50 Hz

Gyártói tanúsítvány:

€ 0344



Dr. Hönle orvosi készülékek

A Dr. K. Hönle Medizintechnik GmbH egy több mint 30 éve működő bajor vállalkozás, amely specializálta magát bőrbetegségek kezelésére alkalmas magas minőségű és értékű, UV-fényterápiás készülékek kifejlesztésére, gyártására és forgalmazására. A bőrgyógyászokkal való szoros együttműködésnek köszönhetően a kezelések optimalizálására kerültek, a mellékhatások így a minimumra csökkentek.

Az intenzív tapasztalatcsere az orvosokkal, betegekkel és forgalmazókkal, a készülékek permanens javulásához vezet és lehetővé teszi új termékek kifejlesztését. A piacon ezek a készülékek számítanak a leginnovatívabbnak. Minőségüket biztosítja a DIN EN ISO 13485 tanúsítvány. Minden készülék rendelkezik a szükséges, az orvosi készülékekre vonatkozó EU-irányelv 93/42 EWG által meghatározott CE jelzéssel.

A felhasználókkal folytatott rendszeres konzultáció, amely a vevők és páciensek elégedettségére engednek következtetni, lehetővé teszi a gyors és közvetlen, főleg igény szerinti reagálást. A termékpalettában megtalálhatók mind a kis felületek, mind pedig a teljes test kezelésére alkalmas eszközök, kabinok és diagnosztikai készülékek. Minden termék a legmagasabb minőségben, ennek ellenére elérhető áron, Németországban kerül legyártásra. Különös figyelmet szenteltünk a készülékek egyszerű és biztonságos kezelésére, hogy a legkülönbözőbb terápiás módszerek eredményes kezelése alkalmazható legyen a teljes indikáció-spektrumra.

A forgalmazás és a szerviztevékenység világszerte partnercégeken keresztül történik, amelyek a saját hazájukon belüli értékesítésért és vevőszolgálatért felelősek. Intenzív továbbképzések biztosítják a folyamatos és magas színvonalú kompetenciát.

Dr. K. Hönle Medizintechnik GmbH

Viktor-Frankl-Straße 20
86916 Kaufering

Telefon: 0 81 91/3 05 55 - 0
Telefax: 0 81 91/3 05 55 - 50

E-Mail: medizin@drhoenle.de
Internet: www.drhoenle.de



dermalight® 5000

Az innovatív, nagyteljesítményű UV-fényterápiás kabin



dermalight® 5000

Sokoldalú és biztonságos



Pácienshez kötött chipkártyás vezérlés



Menüvezérelt érintőképernyős működés

Különleges tulajdonságok

Akár 30%-kal nagyobb fénycső élettartam

- Variálható fénycsőkiosztás
- Intuitív menüvezérlés
- Érintőképernyő
- Állandó UV-szenzoros intenzitásmérés
- Fénycsőkiesés felügyelet
- Acrylüveg a fénycsövek előtt
- Páciens- chipkártya vezérlés
- Hűtőegység páciensnek és fénycsőnek
- Belső képernyő
- 2 kapaszkodórúd a pácienseknek
- Automatikus ajtó-Stop
- Választható jobbra, ill. balra nyíló kabinajtós kivitel
- Kompakt és helytakarékos
- 4 év szavatossági idő



Új UV-fényterápiás technológia

Az elektronikus előtét-készülékkel kombinált UV-fénycsövek alkalmazásával a dermalight® 5000 gazdaságossága és komfortossága nagymértékben növekedett. A fénycsöveket az azokon belül előállított gyújtófeszültség gyújtja be, ezért nincs szükség külső gyújtó szerkezetre. Ez a felhasználó számára a fénycsövek 30%-ig terjedő élettartam-meghosszabbodását jelentheti, és ezáltal kisebb üzemeltetési költségeket a későbbiekben szükségessé váló fénycső-cseréknél.

Fénycsőkiosztás

A dermalight® 5000 UV-kabinban maximum 48 db fénycsövet lehet elhelyezni. Speciálisan, 32 db UV-A sugárzó- és 16 db UV-B/311nm-es sugárzó kombinációjánál, egy homogén UV sugárzás mellett, rövid terápia-időtartamok is adódnak. A tükrőfény-reflektorok beépített szellőztetőikkel kellemes sugárzási klímát biztosítanak. Az elkülönített páciens-hűtés teszi teljessé a komfort-érzést. A sugárzók előtti akril-üveglapok védik a pácienseket, és egyszerűen, gyorsan tisztíthatók. Optikai- és akusztikus jelzések figyelmeztetnek az esetleges zavarokra vagy üzemszünetekre.

UV-érzékelő rendszer

A beépített UV-érzékelők folyamatosan mérik a besugárzás erősségét, ezáltal pontos, megbízható dozimetriát biztosítanak. A besugárzás intenzitásának változásai regisztrálásra kerülnek, és a rendszer figyelembe veszi ezt az aktuális besugárzási idő számításánál. Ugyanígy megállapíthatók a fénycsövek kiesései is.



Egyszerű és biztonságos kezelhetőség



Megvilágított kijelző



Start-/Stop kapcsoló



Acryl belő ajtófogantyú

Chip-kártyás vezérlés

A pácienshez kötött chip-kártyás vezérlés egyszerű, dokumentálható UV-terápiát tesz lehetővé. A rendszer a terápiával kapcsolatos fontos adatokat páciensenként elkülönítetten, egy chip-kártyán tárolja. Az előprogramozás gondoskodik az adatokkal történő visszaélések megakadályozásáról, és a kezelés kockázatait minimálisra csökkenti.

Érintőképernyő

Az érintő-képernyő menüvezérléses kezelése áttekinthető, egyszerű és megbízható. Terápia-fokozatok megadása is lehetséges, amelyeket a felhasználó páciensekre vonatkoztatva, egyénenként előre programozhat. Egy csatlakozó felület közvetítésével az összes releváns adatot át lehet vinni PC-re, aktiválni, és elszámolásokra lehet azokat használni.

Páciensek kényelme és biztonsága

Egy belső, világító kijelző növeli a komfortérzést azzal, hogy kijelzi a hátralevő kezelési időtartamot. A kabin belsejében levő Be- és Ki-kapcsoló lehetővé teszi a páciens számára, hogy a sugárzást saját maga indítsa, illetve állítsa le. A kabin belsejében levő két kapaszkodórúd gondoskodik a páciens helyes pozicionálásáról, és biztonságos, stabil állásáról. A személyzet biztonsága miatt az ajtó kinyitásakor a fénycsövek automatikusan kikapcsolódnak. Klausztofóbiás páciensek kívánságára ezt a mechanizmust hatástalanítani lehet, így kivételes esetekben a sugárzás nyitott ajtó mellett is lehetséges.

Választható kabinajtó kivitel

A dermalight® 5000 UV-kabin kompakt, ezáltal nagyon helytakarékos felépítésű. A kabin ajtaját választás szerint lehet jobbra- vagy balra-nyíló változatban rendelni, ezzel szűkösebb helyeken is lehetővé válik a kabin elhelyezése.

A dermalight® 5000 egy hatékony és biztos UV-fényterápia a teljes test kezelésére az alábbi indikációkra:

- Psoriasis
- Neurodermitis
- Vitiligo
- Polymorf fotodermatózis

A dermalight® 5000 kiválóan alkalmas a legkülönbözőbb fényterápiás kezelésekhez, mint:

- Foto és fotochemoterápia
- PUVA-fürdőterápia
- Balneo-Fototerápia

Magyarországon forgalmazza

MEDILAS
...medizinische Innovationen

Medilas Kereskedelmi Kft.
1089 Budapest, Baross u. 133.
Tel.: +36 1 477 01 30 Fax: +36 1 477 01 32
www.medilas.hu mail@medilas.hu